

HCPSE

ヒロマイスター 豚用精液保存希釈液



豚用精液保存希釈液

- ・ 調合済み希釈液の為、ボトルを温めて直ぐに使用可能
- ・ 調合器具の使用を最小限に留め、疾病侵入リスクを軽減
- ・ 1ℓで 22 ドーズ希釈(1000cc÷45cc)の為、1 ドーズ約 68 円
- ・ 冷凍 6 ヶ月間、冷蔵 1 ヶ月間の製品保管で、希釈後 10 日間の長期保存

HCPSE(ヒロマイスター)

品名

HCPSE(ヒロマイスター) 1リットル



(送料・消費税別途)

使用方法

【凍結保管の場合】有効期間 6 ヶ月

- ①HCPSE(ヒロマイスター)が届きましたら、冷凍室で保管して下さい。
- ②使用時には 37℃の湯温で解凍して下さい。
- ③ご準備された抗生物質 1ml を HCPSE(ヒロマイスター)1ℓに加えて下さい。※推奨(エクセネル)
- ④精液ボトルに 45ml を分注し、5ml(精子数約 50 億)の精液を加えて下さい。
- ⑤混濁後の精液ボトル 50ml を 15 分間室温で放置後、15℃で冷却保存して下さい。

【冷蔵保管の場合】有効期間 1 ヶ月

- ①HCPSE(ヒロマイスター)が届きましたら、4℃で冷蔵保管して下さい。
- ②使用時には 37℃に加温して下さい。
- ③ご準備された抗生物質 1ml を HCPSE(ヒロマイスター)1ℓに加えて下さい。※推奨(エクセネル)
- ④精液ボトルに 45ml 分注し、5ml(精子数約 50 億)の精液を加えて下さい。
- ⑤混濁後の注入ボトル 50ml を 15 分間室温で放置後、15℃で冷却保存して下さい。

株式会社フロンティアインターナショナル

〒215-0025 神奈川県川崎市麻生区五力田 2-9-1



TEL:044-980-2226

FAX: 044-980-2270

URL:<http://www.frontier-intl.co.jp>