

ゴールデンシルクカテーテル 開き方



①



- ビニール袋上部のミシン目が入っている面を手前に向けて下さい。
- ミシン目上部を摘まんで下さい。

②



- ミシン目を開ける為にしっかり引っ張って下さい。



③



- ビニール袋下部のミシン目が入っている面を手前に向けて下さい。
- ミシン目下部を摘まんで下さい。

④





- ミシン目を開ける為にしっかり引っ張って下さい。



ゴールデンシルクカテーテル 使用方法

⑤

- ビニール袋をそのままにしてカテーテルを陰部に挿入してください。
- このことによりジェル塗布とビニール袋の廃棄の手間が省けます。

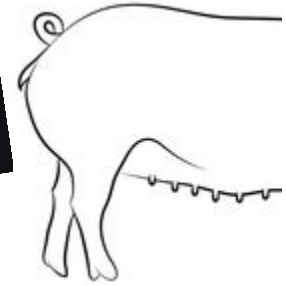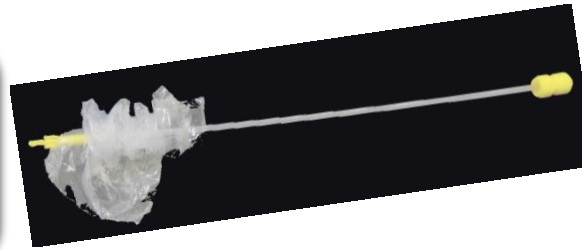

⑥



- 全てのタイプの希釈精液容器（ボトル、チューブ、GTBバッグ、ノズル付バッグ）に接続できます。

GTB バッグ



ボトル



⑦



- 希釈精液を子宮頸管内へ注入完了したらカテーテル尾部のフタを閉めて下さい。

⑧

- AI完了後、ビニール袋とカテーテル全てを一度に廃棄できます。



株式会社 フロンティアインターナショナル
〒215-0025 神奈川県川崎市麻生区五力田2-9-1
TEL : 044-980-2226 FAX : 044-980-2270