

# 2mL プレミアム フオーワード セレクタブル

## 20 - ストップ



動物用  
一般医療機器



✓ 1台 20,000~  
50,000回使用可能

✓ 低用量の  
薬液でも  
正確に投与

✓ 0.1mL~2.0mL用量調整  
(0.1mL刻みメモリ)



✓ 煮沸消毒  
(100℃)  
できるバレル



✓ 握りやすい  
形状で誰でも  
簡単に取扱い

輸入・販売元



株式会社フロンティアインターナショナル  
FRONTIER INTERNATIONAL Co., Ltd.

製造元



SIMCRO LIMITED  
(ニュージーランド)

# 2mL プレミアム フォーワード セレクタブル

## 20 - ストップ



動物の治療を効果的にするには、薬液を適切な投与量を投与する必要があります。シンクロ社のフォーワードセレクタブルインジェクターは、低用量投与でも信頼性の高い用量精度を確保します。すべての用量設定で信頼性と有効性を保証します。

### フォーワードセレクタブル

有効性で最も重要なことは正確性です。注射器内の気泡に気付かなければ、有効性を低下させる不十分な用量を投与する可能性があります。インジェクターのフォーワードセレクタブルの構造は、注射器内の気泡の可能性を低減し、気泡の除去を容易にし、投与の正確さと治療の有効性を高めます。

### 強度、耐久性、無菌性を考慮した設計

フォーワードセレクタブルインジェクターのマルチポジションバルブは、強度、耐久性、無菌性を念頭において設計されています。強い耐久性があり、煮沸による消毒が可能です。バルブのフルメタルアーチチップは、強度と洗浄の容易さだけでなく、簡単に針の取り付けと取り外しが可能です。

### 選択可能な用量及び針基

フォーワードセレクタブルインジェクターは選択した用量を確実に投与することができます。以下の用量及び針基が選択できます。

- 用量: 2.0mL・20目盛り(0.1mL刻み)
- 針基: 5基・10基

### 疲れを軽減

注射器のデザイン・材質は握りやすいグリップで、手指が短い人でも長期間の使用で疲労を感じることはほとんどありません。

### 個別化

社名入れ、機器の色変更により、PRが可能です。



### バルブ内の気泡の除去

バルブ内の気泡は任意に投与量を設定し前にストローク(押し出す)することによってすべてパージ(除去)されます。この注射器の形状、デザインは気泡のパージ(除去)を容易にします。このことは動物の治療の有効性をより高めます。



バルブ内の気泡



前進ストローク



全量(フルボリューム)が回復

### さまざまなボトルマウント製品で利用可能

フォーワードセレクタブルインジェクター製品は従来のキャップカラーボトルマウント、プッシュフィットボトルマウント製品があります。

キャップカラー  
ボトルマウント



プッシュフィット  
ボトルマウント

商品コード: SIM-027(5基)

商品コード: SIM-028(10基)



株式会社フロンティアインターナショナル  
FRONTIER INTERNATIONAL Co., Ltd.

〒215-0025 神奈川県川崎市麻生区五力田2-9-1

TEL 044-980-2226 FAX 044-980-2270

Email: [info@frontier-intl.co.jp](mailto:info@frontier-intl.co.jp)

<http://www.frontier-intl.co.jp>